


Underhållsinstruktion gummerade

Uppvakningsrum

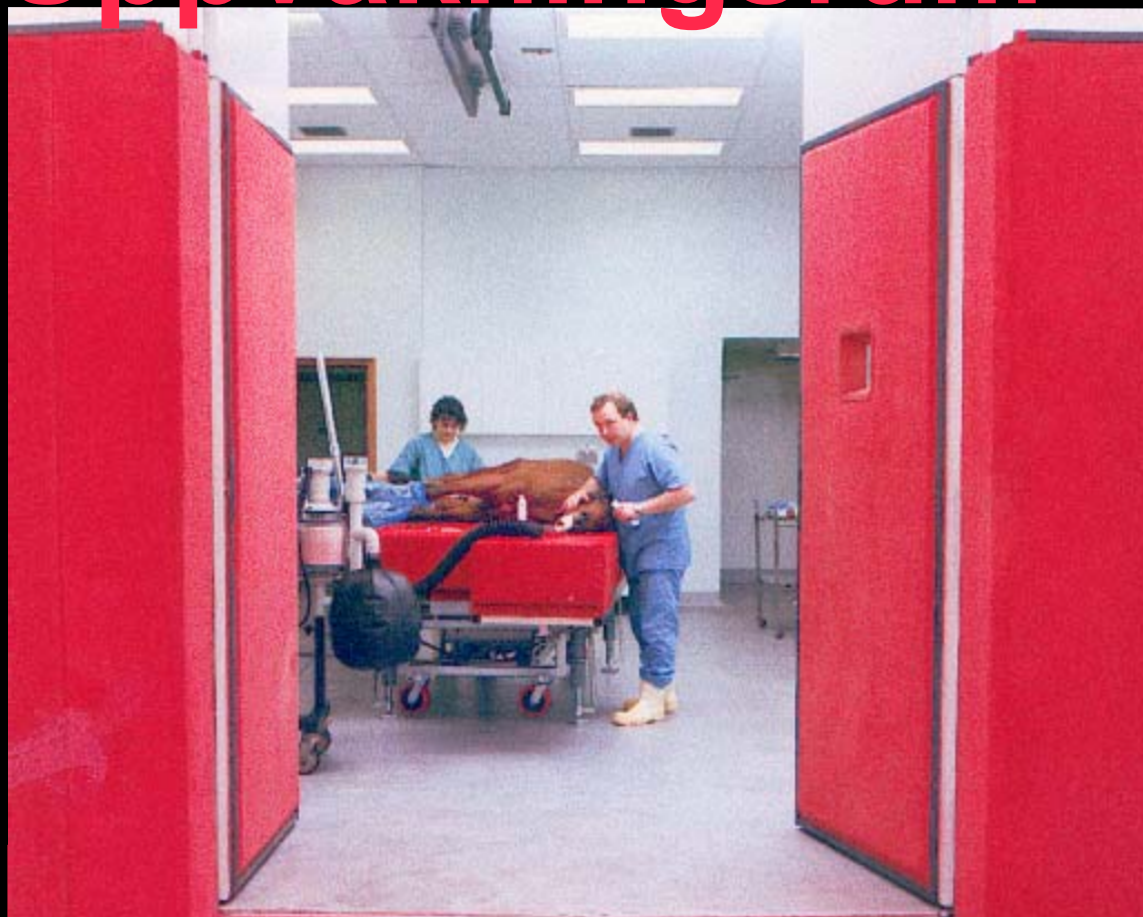

Rätt underhåll ger en maximal livslängd

Våra uppvakningsrum är konstruerade för att med ett litet underhåll ge en lång livslängd. Vi rekommenderar att uppvakningsrummet underhålls enligt våra rekommendationer.

En produkt från **LIMO AB** i Norrköping

Underhåll av gummerade uppvakningsrum

För att få rummet att fungera under långtid utan problem är det nödvändigt att rummet kontinuerligt underhålls enligt följande punkter.

Rengörning

Rengör rummet regelbundet med Linatex Klorolaine 90 för att erhålla ett rent och sterilt uppvakningsrum. Låt aldrig smuts och vätskor torka in i gummibeläggningen.

Rengöringsmedel: Linatex Kloroline 90.

Viktigt !

Lösningsmedel får aldrig användas vid rengöring, då dessa kan påverka UV-skyddet Ozaline och gummiduken.

Inspektion

Inspektera rummet regelbundet för att upptäcka eventuella skador på det tätande yttre gummiskiktet.

Vid skador på gummiskiktet skall detta omedelbart åtgärdas då det annars finns risk för att vätskor tränger in i gummi skikten och bildar möget och lukt.

Gummiduken kan repareras med Linatex fillatex, som är en ovulkaniserad gummi-massa. Ett alternativ vid större skador är att reparera med en duk som vulkas direkt mot ytskiktet.

Efter 3 år bör man behandla gummidukarna på nytt med Ozaline UV-skydd, (målas direkt på gummiväggarna).

Rekommendation

För att undvika skador på golvbeläggningen bör hästar vara oskodda. Skodda hästar skall alltid vara obroddade.



Rekommenderade tillbehör

Kloroline 90, för daglig rengöring.
Linatex Fillatex för mindre skador.

LIMO

L I N A T E X · M O L Y S T R I A A B